

Pince Lama

Pince de positionnement pour les butées d'épaule type Latarjet



Matériel développé en collaboration avec le Dr Abdel Massih Abouchaaya

SURGINOV
Faire de vos idées l'innovation de demain

Pince Lama

Présentation:

La **pince LAMA** a été développée pour la manipulation et le positionnement optimal de la butée osseuse dans les interventions de type Latarjet.

Grâce à sa spatule intra articulaire elle permet de placer la butée affleurante à la glène.

Ses mors sont crénelés pour une bonne préhension du greffon lors de sa manipulation.

La spatule intra articulaire est mousse pour ne pas léser le cartilage articulaire.



Mode d'emploi:

- Prendre le greffon dans la pince.
- Placer la face destinée à être en contact avec la glène au bord du mors le plus court de la pince.
- Donner une légère obliquité au greffon pour ne pas gêner le trajet de la mèche et des vis.
- Positionner la butée à la face antérieure de la glène de telle sorte que la spatule soit au contact du cartilage articulaire, ce qui permet de placer la butée affleurante.



Références:

- Pince Lama: ISONR10P00000002

Prix de vente:

- Pince Lama: 134,75€ HT (161,16€ TTC)

SURGINOV